

PHILIPS

DreamStation 2

CPAP Advanced

Auto CPAP Advanced

Veelgestelde vragen
patiënten



Inhoudsopgave

1. Het apparaat gebruiken.....	1
2. Bevochtiging	2
3. Patiëntgegevens	4
4. Apparaatinformatie	4
5. Drukafgifte	4
6. Connectiviteit.....	6
7. Reiniging	7

1. Het apparaat gebruiken

Waar sluit ik het netsnoer aan?

Het netsnoer wordt aangesloten op de poort onder het apparaat. Het snoer kan naar de linker- of rechterkant van het apparaat worden geleid en naar wens in het kanaal worden geduwd. Zorg er bij de stroomvoorziening voor dat de stekker niet in een stopcontact wordt geplaatst dat wordt bediend door een lichtsakelaar.

Mijn apparaat heeft geen stroom.

Zorg ervoor dat de netsnoeren volledig zijn aangesloten op de stroomvoorziening, het apparaat en het stopcontact. Controleer ook of het stopcontact niet wordt bediend met een lichtsakelaar.

Waar bevinden zich de filters?

Zodra het reservoir is verwijderd, ziet u een wit treklijpje aan de linkerkant van het open apparaat. Trek aan het lijpje dat aan het filter is bevestigd. Het blauwe ultrafijne filter wordt bevestigd aan het grijze pollenfilter.

Hoe bevestig ik het blauwe filter aan het grijze filter?

Op beide filters zijn pijlen te zien. Breng de pijlen op het blauwe filter op één lijn met de pijlen op het grijze filter en klik ze stevig op hun plaats.

Hoe verwijder ik het blauwe filter uit het grijze filter?

Plaats uw vinger in de opening tussen het blauwe filter en het grijze filter om het blauwe filter omhoog te trekken om het te verwijderen.

Waar is de toegang tot de SD-kaart?

Zodra het reservoir is verwijderd, ziet u een kleine sleuf in de rechterbovenhoek van het geopende apparaat. De SD-kaart kan helemaal in de sleuf worden geduwd, totdat u een zachte klik hoort. Als u de SD-kaart wilt verwijderen, drukt u de kaart in zodat deze eruit komt, en u de SD-kaart kunt pakken en verwijderen.

Ik krijg een foutmelding die zegt dat de luchtinlaat geblokkeerd is. Wat moet ik doen?

Controleer of de luchtinlaat niet door iets wordt bedekt. Als dit het geval is, verwijdert u de verstopping of vervangt u indien nodig de filters.

Wat is de witte middelste afdichting die ik op het apparaat zie nadat het reservoir is verwijderd?

Dat is de luchtinlaat-/uitlaatafdichting tussen het apparaat en het waterreservoir. Dit helpt ook om te voorkomen dat er water in het apparaat komt. U kunt dit gebied schoonmaken of het volledig verwijderen om het extra goed te reinigen.

Hoe bevestig ik de verwarmde slang?

Uit de voorkant van het apparaat steekt een uitlaatopening. Bekijk de verwarmde slang en zorg ervoor dat de pen aansluitingen in het uiteinde van de slang op één lijn liggen met de pen aansluitingen aan de onderkant van de uitlaatopening. Schuif het uiteinde van de slang over de uitlaatopening en klik het vast. Om de slang te verwijderen, knijpt u de zijanten van de uiteinden van de slang samen om de verbinding los te maken en schuift u de uitlaatopening er vanaf.

Wat betekent de witte ring rond de therapieknop, en gaat deze uit?

De witte ring geeft aan dat het apparaat van stroom wordt voorzien. De ring gaat uit wanneer het apparaat wordt losgekoppeld of wanneer u door bepaalde menu-/instellingsschermen navigeert. Wanneer de therapie wordt INGESCHAKELD, wordt de ring blauw.

Wat betekent de blauwe ring rond de therapieknop, en gaat deze uit?

De witte ring rond de therapieknop wordt blauw wanneer de therapieknop wordt ingedrukt om de therapie te starten. Dit laat u weten dat er luchtdruk wordt geleverd. Na 1 minuut inactiviteit op het apparaat (wanneer de interactie met het beeldscherm is gestopt), worden de lichtring rond de therapieknop, en het UI-scherm, donker. Als u op het scherm tikt terwijl dit donker is, wordt de gebruikersinterface geactiveerd en gaat de lichtring weer blauw branden (wat betekent dat de therapie wordt toegediend). Als u op de therapieknop drukt om de therapie uit te schakelen, gaat de lichtring weer wit branden.

Mijn scherm is donker geworden, wat moet ik doen?

Als de therapie actief is en er 1 minuut inactiviteit is, worden het scherm en de therapiering donker. Tik op het scherm om het apparaat uit de slaapstand te halen. Als u Ramp Plus hebt ingesteld, wordt hierdoor tegelijkertijd uw Ramp Plus-tijd/druk opnieuw gestart. Als Ramp Plus niet is ingesteld en het apparaat op Auto CPAP werkt, brengt tikken op een van de aanraakzones de druk terug naar uw AUTO MIN-druk.

Het scherm wordt ook donker na 1 minuut inactiviteit als de therapie is uitgeschakeld. Tik één keer op het scherm om het uit de slaapstand te halen.

2. Bevochtiging

Hoe verwijder ik het waterreservoir?

Verwijder het reservoir met uw duim op de inkeping in het reservoir en uw vingers op de onderste greep terwijl het apparaat op een vlakke ondergrond staat. Druk met uw duim op de inkeping boven op het deksel van het reservoir om dit te ontgrendelen en schuif het reservoir weg van het hoofdapparaat.

Hoe verwijder ik het deksel van het waterreservoir en hoe plaats ik het deksel weer terug? Hoe plaats ik het reservoir terug op het apparaat?

Aan de afgeronde kant van het reservoir bevindt zich een vergrendeling die u omhoog kunt trekken om het deksel van de voet van het waterreservoir los te maken. Trek niet aan de kleppen aan de platte kant van het reservoir. Deze kleppen zijn bedoeld om het reservoir op het hoofdapparaat aan te sluiten.

Als u het deksel wilt vervangen nadat u het reservoir met water hebt gevuld, moet u ervoor zorgen dat het reservoir op een vlakke ondergrond staat. Plaats de haken van het deksel over de kleine lipjes op de voet van het waterreservoir. Druk het deksel omlaag totdat het stevig over het voorste lipje van het deksel aan de voorkant van de voet van het waterreservoir klikt.

Als u het waterreservoir van de luchtbevochtiger weer wilt bevestigen, moet u de voet op een vlakke ondergrond laten staan. Til het apparaat niet op. Schuif het waterreservoir van de luchtbevochtiger voor een juiste uitlijning en aansluiting terug op het apparaat met behulp van de rails aan de onderkant van de voet van het waterreservoir. Zorg ervoor dat het reservoir op zijn plaats klikt voordat u verdergaat.

Hoe weet ik hoe hoog het waterreservoir moet worden gevuld? Wat gebeurt er als ik het reservoir te veel vul? Hoe weet ik hoeveel water er in het reservoir zit?

Gebruik de blauwe MAX-vullijnen (zichtbaar wanneer het reservoir van het basisapparaat wordt verwijderd) als richtlijn terwijl het reservoir op een vlakke ondergrond staat. Vul niet boven deze lijnen. De lijn staat voor 325 ml water. Daarnaast zijn er aan de buitenkant van het reservoir MAX-vullijnen aangebracht, zodat de aanwezige waterhoeveelheid kan worden bekeken zonder dat de tank verwijderd hoeft te worden. Houd er rekening mee dat er water uit de kanalen van de uitlaatopening van het reservoir stroomt als er te veel water in het reservoir zit. Daarom moet het reservoir in of in de buurt van een gootsteen worden gevuld.

Waarom loopt de vullijn van het waterreservoir slechts tot halverwege het reservoir? Het lijkt of het reservoir meer water kan bevatten.

De reservoirs zijn ontworpen om te voorkomen dat water het apparaat binnendringt. De vullijnen beperken de waterhoeveelheid om te voorkomen dat water het apparaat binnendringt.

Hoe verwijder en vervang ik de afdichting van mijn waterreservoir?

Til de D-vormige afdichting op terwijl het reservoir op een vlakke ondergrond staat. Als u de D-vormige afdichting weer op het waterreservoir wilt plaatsen, lijnt u de platte kant van de D-vormige afdichting uit met de platte kant van het waterreservoir en drukt u deze naar beneden. Vervolgens drukt u de hele rand van de afdichting omlaag totdat de afdichting volledig in het reservoir zit.

Kan het apparaat worden gebruikt zonder luchtbevochtiger? Is het modulair? Kan het waterreservoir tijdens reizen worden verwijderd?

Het apparaat heeft geïntegreerde bevochtiging. Dit betekent dat het apparaat niet kan worden gebruikt zonder dat het waterreservoir geplaatst is. Als bevochtiging niet gewenst is, doet u geen water in het reservoir en zet u het bevochtigningsniveau op "uit". Zorg er op reis voor dat er geen water in het reservoir zit. Het reservoir kan worden verwijderd tijdens reizen, maar moet voor een goede werking van het apparaat weer worden teruggeplaatst.

Wat is adaptieve bevochtiging?

Het apparaat maakt gebruik van adaptieve bevochtiging wanneer een standaardslang wordt gebruikt. Adaptieve bevochtiging past de temperatuur van de verwarmingsplaat automatisch aan om een constant niveau van relatieve vochtigheid bij het masker te handhaven, en past zich aan de omgevingsomstandigheden in de ruimte aan. Het is ontworpen om condensatie in de slang te voorkomen. Als er een verwarmde slang aan het apparaat wordt bevestigd, schakelt het apparaat automatisch over op verwarmde slangbevochtiging.

Wat zijn de bevochtigingsinstellingen?

De relatieve vochtigheid is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden van de ruimte, die van dag tot dag kunnen verschillen.

Uit = luchtbevochtiger uit. Er wordt geen warmte geleverd aan de verwarmingsplaat.

- 1 = 70% relatieve luchtvochtigheid
- 2 = 74% relatieve luchtvochtigheid
- 3 = 77% relatieve luchtvochtigheid
- 4 = 81% relatieve luchtvochtigheid
- 5 = 85% relatieve luchtvochtigheid

Hoe pas ik het bevochtigingsniveau aan?

Als de therapie is ingeschakeld, verschijnt er een bevochtigingspictogram (waterdruppel met warmte) in de linkerbenedenhoek van het aanraakscherm (als er een verwarmde slang is aangesloten), of het onderste middelste gedeelte van het aanraakscherm (als er een standaardslang wordt gebruikt). Tik op het pictogram tot het gewenste niveau (uit, 1-5) is bereikt. Na een paar seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen. Indien geactiveerd door uw provider, met therapie uitgeschakeld, kunt u ook op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie tikken. Onder het gedeelte Comfort bevindt zich een vochtigheidsinstelling. Tik op de blauwe tekst om het gewenste niveau in te stellen en tik op Afsluiten om terug te keren naar het vorige scherm.

Wat zijn de temperatuurinstellingen van de verwarmde slang?

De instellingen (1-5) hebben betrekking op een bereik (4-16 graden) van instellingen boven kamertemperatuur:

Uit = temperatuur verwarmde slang uit. Er wordt geen warmte geleverd aan de verwarmde slang.

- 1 = 2,2 graden Celsius (4 graden Fahrenheit) boven kamertemperatuur
- 2 = 3,9 graden Celsius (7 graden Fahrenheit) boven kamertemperatuur
- 3 = 5,6 graden Celsius (10 graden Fahrenheit) boven kamertemperatuur
- 4 = 7,2 graden Celsius (13 graden Fahrenheit) boven kamertemperatuur
- 5 = 8,9 graden Celsius (16 graden Fahrenheit) boven kamertemperatuur

Hoe pas ik de temperatuur van de verwarmde slang aan?

Het apparaat detecteert automatisch de aanwezigheid van een verwarmde slang (12 mm of 15 mm). Als de therapie is ingeschakeld en er een verwarmde slang aan het apparaat is bevestigd, staat er een pictogram voor een verwarmde slang (cirkel met warmte) in de rechterbenedenhoek van het aanraakscherm (als er geen verwarmde slang is bevestigd, wordt het pictogram niet weergegeven). Tik op het pictogram tot het gewenste niveau (uit, 1-5) is bereikt. Na een paar seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen. Indien geactiveerd door uw provider, met therapie uitgeschakeld, kunt u ook op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie tikken. Onder het gedeelte Comfort bevindt zich de temperatuurinstelling voor de verwarmde slang. Tik op de blauwe tekst om het gewenste niveau in te stellen en tik op Afsluiten om terug te keren naar het vorige scherm.

Mijn waterreservoir bevat bijna geen water meer... wat is er aan de hand?

Hebt u het reservoir aan het begin van elke therapiesessie bijgevuld? Omdat het apparaat gebruikmaakt van adaptieve bevochtiging, kan het zijn dat u het apparaat in een bijzonder droge omgeving gebruikt. Zorg ervoor dat u het reservoir elke avond bijvult.

Ik krijg water in mijn slang, wat moet ik doen?

Dit wordt condenswater genoemd, wat wordt veroorzaakt door het afkoelen van de lucht die naar uw masker stroomt en het condenseren in druppels aan de binnenkant van de slang. Voer de onderstaande stappen uit om dit te helpen voorkomen:

- Verplaats uw CPAP-apparaat naar een lagere hoogte dan uw masker.
- Stel de temperatuur in uw slaapkamer iets warmer in.
- Plaats de slang onder een deken om de slang warmer te houden en de kans op condensatie te verkleinen.
- Pas de instellingen van de luchtbevochtiger aan. Als u in een warm of zeer vochtig klimaat woont, hebt u mogelijk geen hoge bevochtigingsinstelling nodig.
- Activeer of verhoog de temperatuur van de verwarmde slang om de luchttemperatuur constant te houden.

Waarom verschijnt er een pop-upfoutmelding als ik een batterij met mijn apparaat heb gebruikt?

Het pop-upbericht verschijnt om u te waarschuwen dat bevochtiging niet wordt ondersteund tijdens het gebruik van een batterij. Het bericht blijft verschijnen, zelfs als de bevochtiging is uitgeschakeld. U kunt het bericht negeren: u zult merken dat de therapie nog steeds kan worden uitgevoerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie en het oplossen van problemen.

Kan ik kraanwater gebruiken?

Philips raadt het gebruik van gedistilleerd water aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor het schoonmaken.

3. Patiëntgegevens

In het hoofdscherm van mijn laatste sessie zie ik alleen therapie-uren en pasvorm van het masker. Waar is mijn overige informatie?

Uw provider heeft wellicht besloten u een verkorte weergave van uw informatie te geven. U kunt uw provider vragen of er aanvullende informatie kan worden weergegeven. Of u opent de DreamMapper-app om meer gedetailleerde informatie over uw therapiesessies te bekijken.

Hoe kan ik mijn overzicht van 3 nachten of de AHI-uitleg bekijken, of de pasvorm van het masker controleren?

Tik in het hoofdscherm Laatste sessie op de blauwe tekst: hierdoor wordt een nieuw venster geopend waarin de bijbehorende informatie wordt weergegeven:

- 'Therapie-uren' leidt u naar een overzicht van 3 nachten.
- 'AHI-waarde' leidt u naar een scherm met uitleg over AHI.
- 'Goede pasvorm' of 'Paspvorm aanpassen' leidt u naar het scherm waar u een controle van de pasvorm van het masker kunt uitvoeren.

Wat is Rapporten bekijken? Hoe kan ik aanvullende informatie bekijken?

Met Rapporten bekijken kunt u (indien door uw provider ingeschakeld) een gedetailleerdere weergave van uw therapiegegevens bekijken. In het hoofdscherm Laatste sessie wordt alleen een samenvatting van uw laatste sessie weergegeven. Als u meer informatie wilt weergegeven, tikt u op Instellingen in het hoofdscherm Laatste sessie. Blader totdat Rapporten bekijken wordt weergegeven en tik op deze knop. U kunt de tijdsperiode die u wilt bekijken selecteren, en er worden gemiddelden van elk gegevenspunt voor die geselecteerde tijdsperiode weergegeven.

Ik heb 8 uur geslapen, maar mijn apparaat zegt dat ik 7 therapie-uren heb gehad. Wat is er gebeurd?

Misschien hebt u uw masker 's nachts afgedaan. Het apparaat kan detecteren wanneer de therapie daadwerkelijk aan een patiënt wordt toegediend.

Ik wil meer informatie bekijken dan die momenteel op mijn apparaat wordt weergegeven. Waar kan ik meer informatie vinden?

Download de DreamMapper-app. Hier kunt u meer statistieken over uw therapiesessies bekijken.

4. Apparaatinformatie

Hoe wijzig ik taal en tijd?

Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. Blader naar het gedeelte Apparaat. Tik op de taal of tijd om aanpassingen door te voeren.

Waar kan ik het serienummer van mijn apparaat vinden?

Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. Veeg omhoog op het scherm tot u bij het gedeelte Apparaat komt. U kunt het apparaat ook omdraaien (als er geen water in het reservoir van de luchtbevochtiger zit), zodat u het serienummer op het apparaatlabel kunt zien.

5. Drukafgifte

Hoe weet ik welke druk wordt geleverd?

Wanneer de therapie wordt uitgevoerd, wordt een drukwaarde op het scherm weergegeven. Als u een gesloten ring ziet, betekent dit dat er therapiedruk wordt toegediend. Als u een gestippelde ring ziet, betekent dit dat de ingestelde Ramp Plus-druk wordt geleverd.

Hoe kan ik mijn FLEX-instelling aanpassen?

Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. In het gedeelte Comfort ziet u de FLEX-instellingen (indien door uw provider ingeschakeld). Tik op de waarde om een aanpassing uit te voeren (uit, 1, 2 of 3).

Hoe pas ik de slanggrootte aan?

Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. In het gedeelte Comfort ziet u de instelling voor de slang. Tik op de waarde om aan te geven welke maat slang u gebruikt. Als er een verwarmde slang aan het apparaat is bevestigd, wordt deze instelling niet weergegeven in het menu, omdat het apparaat dan automatisch kan detecteren welk formaat slang wordt gebruikt.

Hoe pas ik mijn Ramp Plus-druk aan?

Tik terwijl de therapie wordt uitgevoerd op het pictogram Ramp Plus in het midden van het scherm. Hierdoor wordt Ramp Plus geactiveerd, als dit nog niet was ingesteld. Tik op de symbolen + en – tot het gewenste niveau is bereikt en tik op Bevestigen om de instelling op te slaan.

U kunt ook terwijl de therapie is uitgeschakeld op de knop Instellingen in het scherm Laatste sessie tikken. In het gedeelte Comfort ziet u de instelling Ramp Plus (indien door de provider ingeschakeld). Tik op de waarde om de Ramp Plus-tijd (15, 30 of 45 min) en de Ramp Plus-druk (uit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) aan te passen.

Hoe pas ik mijn Ramp Plus-tijd aan?

Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. In het gedeelte Comfort ziet u de instelling Ramp Plus. Tik op de waarde om de Ramp Plus-tijd (15, 30 of 45min) in te stellen, en vervolgens de Ramp Plus-druk.

De geleverde druk is oncomfortabel (te hoog of te laag). Wat kan ik doen om dit te verhelpen?

U kunt beginnen met het aanpassen van uw Ramp Plus-druk. Tik terwijl de therapie wordt uitgevoerd op het pictogram Ramp Plus in het midden van het scherm. Hierdoor wordt Ramp Plus geactiveerd, als dit nog niet was ingesteld. Tik op de symbolen + en – tot het gewenste niveau is bereikt en tik op Bevestigen om de instelling op te slaan. De druk die u kiest op basis van uw gewenste comfortniveau wordt gedurende een bepaalde periode (standaard 30 minuten) geleverd terwijl u probeert in slaap te vallen. Wanneer de Ramp Plus tijd is afgelopen, levert het apparaat de voorgeschreven therapiedruk. U kunt deze Ramp Plus-druk opnieuw activeren door nogmaals op het Ramp Plus-symbool te tikken of door bij een donker scherm op een willekeurige plaats op het scherm te tikken. Als u in slaap valt voordat de Ramp Plus-tijd is verstreken en een gebeurtenis plaatsvindt (bijv. apneu of hypopneu), wordt de druk automatisch aangepast en de benodigde druk geleverd.

U kunt ook terwijl de therapie is uitgeschakeld op de knop Instellingen in het scherm Laatste sessie tikken. In het gedeelte Comfort ziet u de instelling Ramp Plus. Tik op de waarde om de Ramp Plus-tijd (15, 30 of 45 min) en de Ramp Plus-druk (uit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) aan te passen.

Een andere manier om ongemak op te lossen is door uw FLEX-instelling aan te passen (indien door uw provider ingeschakeld). Met de therapie uitgeschakeld, tikt u op de knop Instellingen op het scherm Laatste sessie. In het gedeelte Comfort ziet u de FLEX-instellingen (indien door uw provider ingeschakeld). Tik op de waarde om een aanpassing uit te voeren (uit, 1, 2 of 3).

Als geen van de bovenstaande oplossingen helpt, neem dan contact op met uw leverancier of slaaparts voor verdere hulp.

Waarom is mijn therapie gestart zonder dat op de therapieknop is gedrukt/is er een manier om de therapie te starten zonder op de therapieknop te drukken?

Als u uw masker opzet terwijl het is aangesloten op de slang en het PAP-apparaat en u begint te ademen, detecteert het apparaat de ademhaling automatisch en wordt de therapie gestart. Als u deze functie niet wilt gebruiken, moet u contact opnemen met uw provider om deze functie uit te schakelen, omdat AUTOMATISCH INSCHAKELEN standaard is ingeschakeld.

Waarom is mijn therapiedruk halverwege de nacht gedaald?

Mogelijk hebt u per ongeluk op het UI-scherm getikt, waardoor het apparaat uw Ramp Plus-druk (indien ingesteld) heeft geactiveerd, of terug is gegaan naar uw Auto Min-druk.

Ik hoor het lekken in mijn masker. Wat kan ik hieraan doen? Hoe kan ik de pasvorm van het masker controleren?

U moet uw masker volgens de instructies aanpassen om een juiste pasvorm te garanderen. U kunt een controle van de pasvorm van het masker op het apparaat uitvoeren om te zien of uw aanpassingen de pasvorm hebben verbeterd.

Tik in het scherm Laatste sessie bij Pasvorm masker op Goede pasvorm of Pasvorm aanpassen. Er verschijnt een nieuw venster waarin u een pasvormcontrole van het masker kunt starten. Zet uw masker op. Tik op Start om de controle van de pasvorm van het masker te starten. Pas het masker aan totdat op het scherm Goede pasvorm wordt weergegeven.

Op het apparaat wordt Pasvorm aanpassen weergegeven voor het aanpassen van mijn masker. Wat betekent dit en hoe los ik dit op?

Dit betekent dat het masker lekt, en daarom ontvangt u mogelijk niet de optimale voorgeschreven druk in het masker. U moet uw masker volgens de instructies aanpassen om een juiste pasvorm te garanderen. U kunt een controle van de pasvorm van het masker op het apparaat uitvoeren om te zien of uw aanpassingen de pasvorm hebben verbeterd.

Tik in het scherm Laatste sessie bij Pasvorm masker op Goede pasvorm of Pasvorm aanpassen. Er verschijnt een nieuw venster waarin u een pasvormcontrole van het masker kunt starten. Zet uw masker op en tik op Start om de controle van de pasvorm van het masker te starten. Pas het masker aan totdat op het scherm Goede pasvorm wordt weergegeven.

6. Connectiviteit

De celbalken zijn grijs of verschijnen helemaal niet. Wat is het probleem?

Grijze celbalken geven aan dat uw mobiele modem niet is aangesloten. U kunt proberen uw toestel te verplaatsen om te zien of hierdoor de signaalsterkte verbetert.

U kunt ook controleren of uw toestel misschien in vliegtuigmodus staat. Als dat zo is, ziet u een vliegtuigpictogram in plaats van de celbalken. U kunt de vliegtuigmodus uitschakelen als de therapie is uitgeschakeld. Tik op Instellingen op het hoofdscherm Laatste sessie. Veeg omhoog op het scherm naar het gedeelte Apparaat totdat de vliegtuigmodus wordt weergegeven. Als AAN wordt weergegeven, betekent dit dat de mobiele modem- en Bluetooth-verbindingen zijn uitgeschakeld. Tik op de blauwe tekst om de vliegtuigmodus uit te schakelen en de verbindingen te activeren. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, blijft deze na het instellen 72 uur aanstaan. Vervolgens worden de mobiele en Bluetooth-verbindingen automatisch uitgeschakeld en opnieuw geactiveerd.

U kunt proberen problemen op te lossen door het apparaat uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten om een prestatiecontrole te starten. Hiermee wordt ook geprobeerd een oproep via een mobiele modem te starten.

Als er het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw provider. De provider kan u vragen om via het hoofdscherm van Laatste sessie naar het menu Instellingen en vervolgens het gedeelte Apparaat te navigeren. Tik op de blauwe tekst naast Mobiel modem om de modemstatus en het tijdstip van de laatste oproep weer te geven. Deel deze informatie met uw provider voor verdere probleemoplossing.

Hoe koppel ik mijn CPAP aan DreamMapper op mijn telefoon?

Download de DreamMapper-app op uw smart-apparaat. Start de Bluetooth-installatie en -koppeling in DreamMapper terwijl het apparaat en uw smart-apparaat gebruiksklaar en in de buurt zijn. Volg de koppelingsinstructies in DreamMapper.

Er verschijnt een 6-cijferige pincode op het CPAP-scherm. Afhankelijk van uw telefoon moet u binnen 30 seconden de pincode invoeren in DreamMapper of tikken op Koppelen op het scherm van het apparaat om het koppelen te voltooien.

Op het scherm wordt achtereenvolgens 'Koppelen met apparaat' en 'Geslaagd: Apparaat is nu gekoppeld' weergegeven.

De CPAP laat me geen ander apparaat koppelen. Waarom?

Met het CPAP-apparaat kunt u 3 apparaten plus een pulsoximeter (4 in totaal) koppelen. Indien u nog een ander apparaat wilt koppelen, moet u eerst de koppeling met het huidige apparaat verbreken. Tik op Instellingen op het hoofdscherm Laatste sessie. Blader naar het gedeelte Apparaat totdat Bluetooth wordt weergegeven. Tik op de blauwe tekst en verwijder overbodige apparaten die u niet wilt koppelen.

Hoe kan ik mijn Bluetooth-koppelingen wissen?

Tik op Instellingen op het hoofdscherm Laatste sessie. Blader naar het gedeelte Apparaat totdat Bluetooth wordt weergegeven. Tik op de blauwe tekst en verwijder (door op de prullenbak te tikken) alle overbodige apparaten die u niet wilt koppelen.

Kan ik het toestel meenemen in een vliegtuig?

Ja. Op de achterkant van uw gebruikershandleiding staat een officiële verklaring over de mogelijkheid om een PAP-apparaat mee te nemen in een vliegtuig.

Kan ik het apparaat in een vliegtuig gebruiken? Hoe zet ik de vliegtuigmodus aan?

Ja. U kunt het apparaat aansluiten op een stopcontact in een vliegtuig. Als u de mobiele en Bluetooth-verbindingen stop wilt zetten, schakelt u de vliegtuigmodus in. Tik op Instellingen op het hoofdscherm Laatste sessie. Blader naar het gedeelte Apparaat totdat de vliegtuigmodus wordt weergegeven. Als AAN wordt weergegeven, betekent dit dat de mobiele modem- en Bluetooth-verbindingen zijn uitgeschakeld. Tik op de blauwe tekst om de vliegtuigmodus uit te schakelen en de verbindingen te activeren. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, blijft deze na het instellen 72 uur aan. Vervolgens worden de mobiele en Bluetooth-verbindingen automatisch uitgeschakeld en opnieuw geactiveerd.

Ik heb problemen met het aansluiten van mijn pulsoximeter op de CPAP.

Hebt u gecontroleerd of de Nonin BLE3150-pulsoximeter batterijen bevat? Hebt u gecontroleerd of de therapie is ingeschakeld? Het duurt in eerste instantie 30 seconden voordat de eerste koppeling tot stand is gebracht. Boven aan het CPAP-scherm verschijnt een SpO2-symbool om aan te geven dat het apparaat klaar is om uw SpO2-metwaarden te registreren.

Ik heb een pop-up ontvangen dat de pulsoximeter-aflezing niet geslaagd is. Wat moet ik doen?

Een niet-geslaagd pulsoximeter-aflezing kan om verschillende redenen optreden. Houd er rekening mee dat voor een geslaagde aflezing minstens 4 uur geregistreerde therapie nodig is. Zijn de batterijen van de pulsoximeter leeg? Is de vingersensor 's nachts van uw vinger gegleden? Hebt u het CPAP-apparaat 4 uur of langer zonder lange onderbrekingen gebruikt?

Controleer het bovenstaande en probeer het de volgende nacht opnieuw.

De gegevens in DreamMapper worden niet bijgewerkt. Wat moet ik doen?

Controleer of de vliegtuigmodus niet is ingeschakeld op uw toestel. Hierdoor worden Bluetooth-verbindingen uitgeschakeld. Tik op Instellingen op het hoofdscherm Laatste sessie. Blader naar het gedeelte Apparaat totdat de vliegtuigmodus wordt weergegeven. Als AAN wordt weergegeven, betekent dit dat de mobiele modem- en Bluetooth-verbindingen zijn uitgeschakeld. Als u deze wilt inschakelen, tikt u op de blauwe tekst om de vliegtuigmodus UIT te schakelen. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, blijft deze na het instellen 72 uur aanstaan. Vervolgens worden de mobiele en Bluetooth-verbindingen automatisch uitgeschakeld en opnieuw geactiveerd.

U kunt ook controleren of op uw smart-toestel Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld. Uw toestel moet zich in de buurt van het CPAP-apparaat bevinden om gegevens te kunnen overdragen. Controleer ook of DreamMapper actief en niet afgesloten is.

Hoe kan ik een modemoproep forceren?

Verwijder de stekker uit het apparaat en sluit deze vervolgens weer aan. Hierdoor wordt ook een prestatiecontrole geforceerd. Als er een probleem is, verschijnt een pop-upvenster op het scherm.

7. Reiniging

Kan ik de buitenkant van mijn apparaat schoonmaken?

Ja. Reinig de buitenkant wekelijks en de afdichting van de luchtinlaat/uitlaat dagelijks. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor reiniging.

Hoe vaak moet ik het grijze filter schoonmaken of vervangen?

Spoel het grijze, herbruikbare filter elke twee weken af met water. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies.

Hoe vaak moet ik het blauwe filter schoonmaken of vervangen?

Reinig of spoel het blauwe wegwerpfILTER niet. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor vervanging.

Is de slang vaatwasmachinebestendig?

Nee. Slangen moeten wekelijks worden schoongemaakt met water en een mild afwasmiddel. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor reiniging.

Kan ik de verwarmde slang in water dompelen?

Ja. De verwarmde slang kan tijdens het schoonmaken in water worden ondergedompeld. Zorg ervoor dat de slang goed droog is voordat u deze weer op het CPAP-apparaat bevestigt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor reiniging.

Kan ik de luchtbevochtiger reinigen?

Ja. De luchtbevochtiger moet dagelijks worden schoongemaakt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor reiniging.

Is de luchtbevochtiger vaatwasmachinebestendig?

Ja. Het reservoir voor luchtbevochtiging, de afdichting en het deksel kunnen wekelijks in de vaatwasmachine worden gereinigd. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies voor reiniging.



Raadpleeg de gebruikershandleiding van
DreamStation 2 CPAP/Auto CPAP Advanced
voor meer informatie.



Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 VS



Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Duitsland



1150540 R01
BNL/CK/
25/11/2021
NL-INTL